



WaveRail^{MC}

Barre d'appui pour lit

Article : 16H289



Scanner ce code pour
voir d'autres excellents
produits Parsons



Parsons ADL Inc., 1986 Sideroad 15, Tottenham, ON Canada L0G 1W0

1-800-263-1281

www.parsonsadl.com


⚠ PRÉCAUTIONS ET MISE EN GARDE

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser la barre d'appui *WaveRail*.
- Veuillez lire les étiquettes de mise en garde apposées sur les pièces de la *WaveRail*.
- La *WaveRail* est une barre d'appui fonctionnelle pour le lit qui vous aide à garder l'équilibre.
 - Cette barre est conçue pour les personnes mobiles qui ont besoin d'assistance pour se déplacer ou pour s'asseoir sur leur lit.
 - Elle aide à garder l'équilibre lorsqu'une personne se couche et se lève.
 - Elle favorise également l'équilibre lorsqu'une personne se tient près du lit ou lors des transferts près du lit.
- Cette barre n'est pas conçue pour supporter le poids entier d'une personne et ne convient qu'aux personnes qui pèsent moins de 135 kg (300 livres).
- Les lits étroits peuvent s'incliner si le poids du corps est entièrement appliqué sur la barre.
- Cette barre d'appui convient à tous les lits de style résidentiel avec sommier à ressorts.
- Peut être utilisée avec certains types de lits ajustables de style institutionnel ou hospitalier.

⚠ La barre d'appui *WaveRail* NE DOIT PAS être attachée à aucune partie d'un lit de type institutionnel ou hospitalier qui peut se déplacer ou qui est ajustable. Les sangles de sécurité de la barre d'appui *WaveRail* NE doivent PAS entrer en contact avec aucune partie du lit en mouvement.

AVERTISSEMENT : TOUT COINCEMENT ENTRE UN DISPOSITIF DE BARRE D'APPUI POUR LE LIT ET UN MATELAS PEUT S'AVÉRER SÉRIEUX ET POTENTIELLEMENT MORTEL.

- Un piégeage peut se produire lorsqu'il y a un espace entre le côté du matelas et la barre d'appui.
- Il est possible que la tête, le cou, les bras, les jambes ou le corps d'une personne deviennent coincés entre le côté du matelas et les barres horizontales ou verticales de la barre d'appui.
- Le matelas doit être bien serré contre la barre d'appui, sans laisser d'espace, et ce en tout temps. Cela devrait être vérifié fréquemment, au moins de façon quotidienne.
- Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'installer deux barres d'appui *WaveRail*, une de chaque côté du lit, pour aider à maintenir le matelas en place, sans laisser d'espace. **MISE EN GARDE** : Si le sommier est plus large que le matelas, deux barres d'appui ne fonctionneront PAS.
- Les barres horizontales et les sangles de sécurité doivent être utilisées en tout temps.
- La *WaveRail* n'est PAS destinée aux personnes à mobilité réduite ni aux personnes alitées de façon permanente. Des mesures de sécurité et des précautions supplémentaires doivent être utilisées chez les patients à risque élevé.
- La *WaveRail* NE DOIT PAS être utilisée comme dispositif de retenue ni pour empêcher de tomber du lit.
- Renseignez-vous sur la sécurité des barres d'appui pour le lit. Il existe de nombreuses ressources en ligne, notamment : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-et-appareils-medicaux/securite-et-lits-hopitaux.html>
- Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle de Parsons à l'adresse custserv@parsonsadl.com.

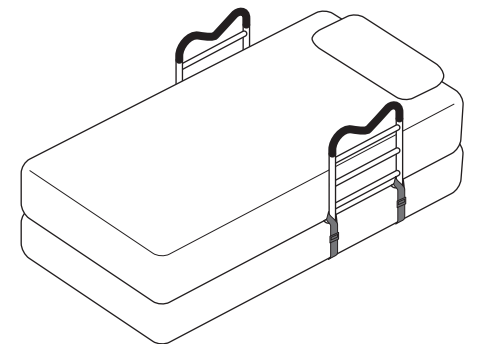


Instructions d'assemblage de la barre d'appui WaveRail


Préparation de la barre d'appui WaveRail pour l'assemblage :

- Ouvrez la boîte et retirez toutes les pièces. Enlevez les revêtements en plastique et éliminez-les en toute sécurité, loin des enfants et des nourrissons.
- La WaveRail peut être utilisée avec deux (2) barres transversales ou trois (3) barres transversales. En choisissant l'option de soit deux (2) ou trois (3) barres transversales, vous pouvez régler la hauteur de la WaveRail par rapport au sol et selon la préférence de l'utilisateur. Pour les matelas épais, nous vous recommandons d'utiliser trois (3) barres transversales. Si vous choisissez d'utiliser deux barres transversales, la partie D (barre en H) n'est pas requise. Gardez cette pièce pour une utilisation future éventuelle.


L'assemblage de la barre d'appui WaveRail :

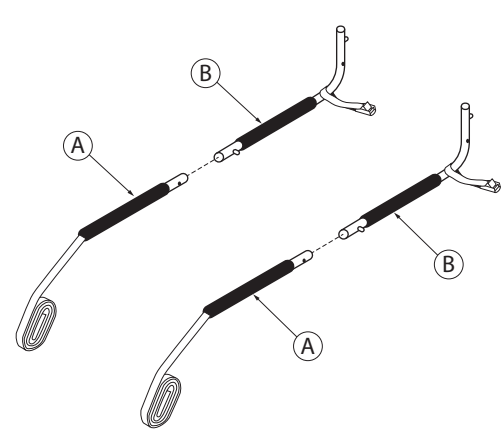


3. Fixez la pièce A dans la pièce B. Répétez de l'autre côté.

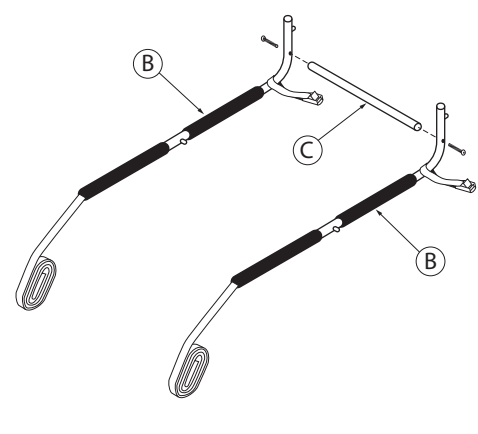


4. Vissez la pièce C sur les pièces B à l'aide de la clé Allen (fournie). Laissez les vis desserrées.

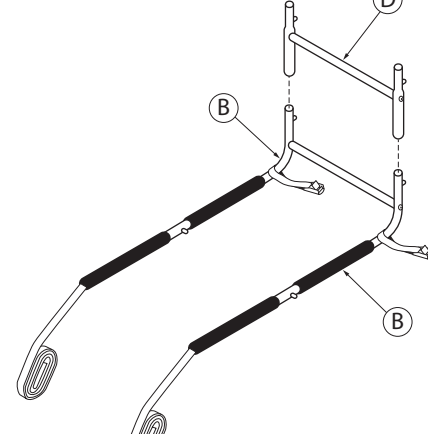

5. Si vous utilisez la pièce D (barre en H), fixez la pièce D sur la pièce B.

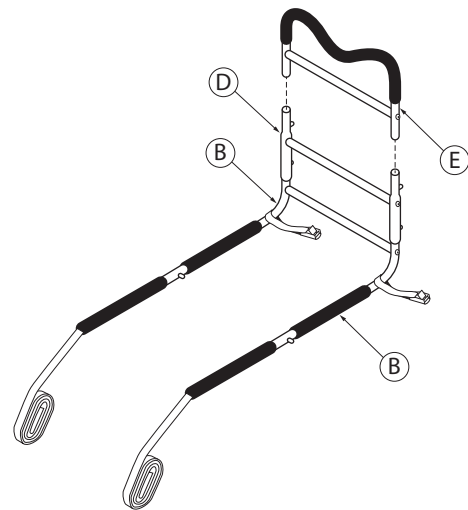


6. En dernier, fixez la pièce E soit sur la pièce D ou sur la pièce B. Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs à ressort sont en place. **Bien serrer toutes les vis.**

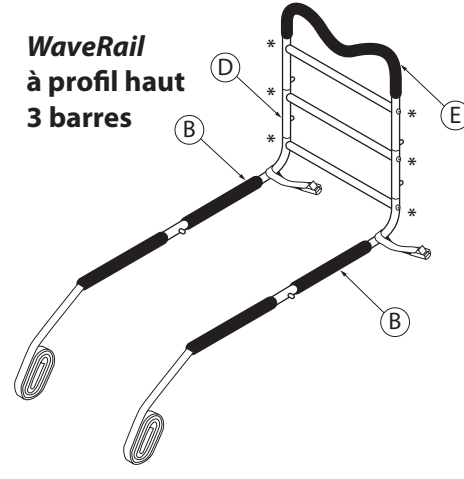

WaveRail à profil haut 3 barres

*** Conseil :** Si vous utilisez la pièce D et que vous éprouvez des difficultés lorsque vous fixez la pièce E sur la pièce D, desserrez légèrement les vis situées de chaque côté des barres transversales. Réengagez toutes les pièces avec les verrous à ressort. Ensuite, bien resserrer les vis.

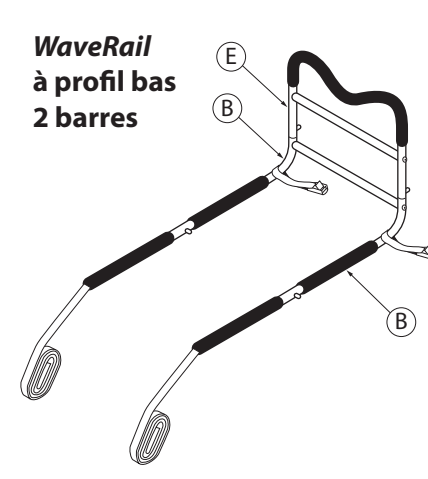

WaveRail à profil bas 2 barres

Vous êtes maintenant prêt à installer la barre d'appui WaveRail sur votre lit.


Veuillez voir page suivante pour les instructions d'installation.

Instructions d'installation de la barre d'appui WaveRail


Installation de la barre d'appui WaveRail sur le lit :

- Vous trouverez l'installation plus facile si vous retirez le matelas. Placez la barre d'appui WaveRail assemblée sur le dessus du sommier.

- Faites passer la longue sangle (pièce F) sur le dessus du sommier puis en dessous pour revenir à la WaveRail.

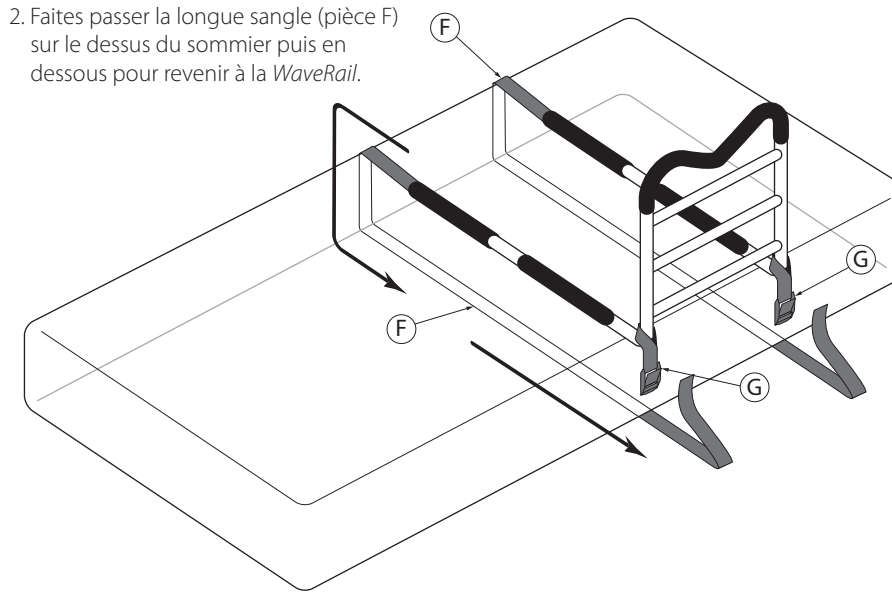


- Passez la longue sangle dans la boucle (partie G) à la longueur souhaitée. Fermez la boucle pour sécuriser la sangle. Répétez de l'autre côté.

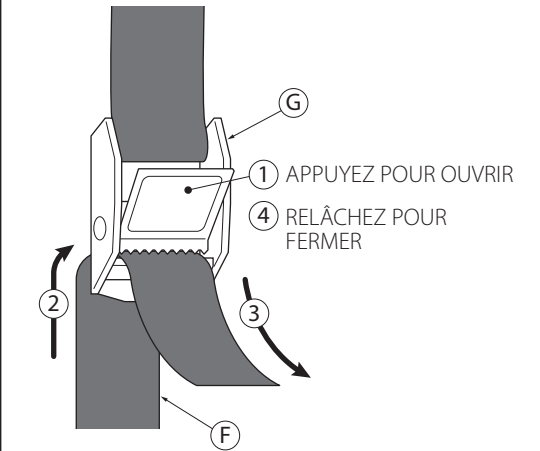


- Remplacez le matelas sur le lit si vous l'avez retiré.
- Allongez-vous sur le lit et positionnez la WaveRail à l'endroit qui vous convient le mieux.
- Serrez fermement les deux sangles contre le sommier en veillant à ce que les sangles soient droites et parallèles.
- Bouclez et attachez à double nœud l'extrémité libre de la longue sangle directement sous la boucle. **Cachez le surplus de la sangle hors de la portée de façon sécuritaire pour éviter tout risque de chute.**

WaveRail à profil haut 3 barres

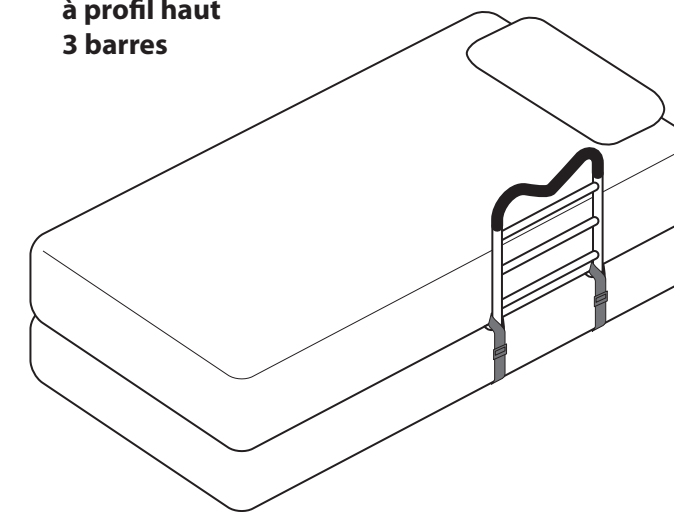

WaveRail à profil bas 2 barres

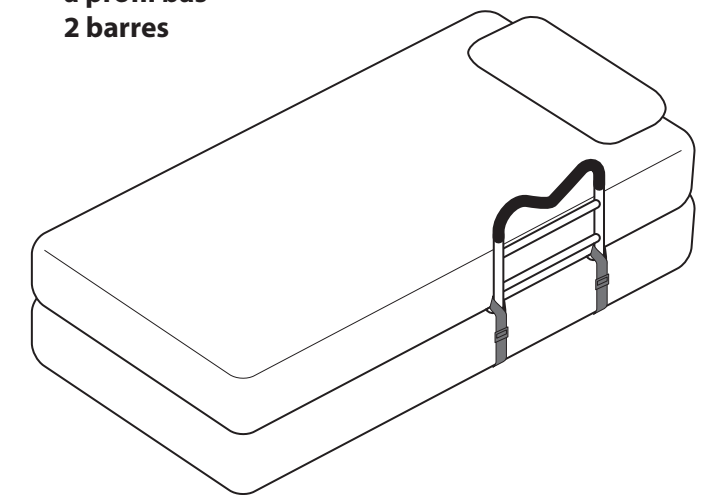

IMPORTANT : Pour votre sécurité, il est obligatoire d'installer les sangles de sécurité (pièces F) fournies avec cette barre d'appui pour le lit, comme indiqué ci-dessus.